



**GC**



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

# EOM AQUA

歯科用ユニット イオム アクア



## 満たす、浮かぶ、流れる。 歯科用ユニット「イオム アクア」

衛生的であること。それは歯科医療において重要なテーマであり、患者さまの心の声でもあります。  
また心地よさと使いやすさに優れていること。それは、患者さまと先生方に、理想の時間をお届けします。  
標準装備のユニット給水管路洗浄システムは、見えないユニット内の水路をきれいな水で満たし、  
患者さまに信頼をお届けする最初の1滴へと導きます。  
患者さまの心に寄り添うシートは、緊張をやさしくほぐし、多彩な機能は様々なシーンに応えます。  
すべての安心と満足、そして信頼のために、  
患者さまと先生方の視点から生まれた歯科用ユニット『イオム アクア』は、  
水の衛生環境を守り、水に包まれたような安らぎと、流れるようなオペレーションを叶えます。



満たされる安心を、隅々まで届けます。



水環境を、より衛生的に。

過酸化水素に銀イオンを配合した専用の洗浄液<sup>※</sup>によるユニット給水管路洗浄システム「ツインターボクリーナーII」を標準装備。フラッシング機能と共に水路の洗浄とすすぎで口腔内に含む水を、より衛生的に保持。窓のブルーライトが清潔感を伝えます。\*別売の「ツインターボクリーナー液」を希釈した洗浄液



ツインターボ  
クリーナーII

気になる部分を隅々まで清潔に。

患者さまが気にかけている給水部には、着脱可能な給水ノズルとコップトレイを採用。お手入れしやすい注水口が、衛生的な印象を保ちます。

丸ごと洗って衛生的な磁器製。

衛生面が特に気になるスピットンには、汚れが付きにくい磁器を採用。簡単に取り外して洗うことができるので、手の届かない側面や裏側まで清潔に保ちます。




安らぎの浮遊感と快適性が、信頼に応えます。



着席も退席も、スムーズに。  
乗り降りしやすいステップレスチェアもご用意。  
座面を395mmまで下げることができるので、ご高齢者やお子さまにも快適です。



不安を和らげるホールド感。  
ワイドなシートは肘までサポートし、体を優しく包む、ほどよい安定感。やわらかいリラクゼーションシート“シフォン”<sup>※</sup>が、患者さまの緊張感を軽減します。  
<sup>※</sup>オプション（標準色のみ）

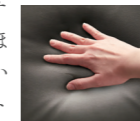

**chiffon**  
リラクゼーションシート  
【シフォン】



うがいの姿勢も無理なく。  
可動式スピットンを採用し、体をひねることなく、ラクな姿勢でうがいすることができます。チェアの動きと連動するオートスピットン<sup>※</sup>もご用意しています。 <sup>※</sup>オプション



欲しい所に、こんな手すりを。  
握りやすいサポートバー<sup>※</sup>が、患者さまの着席・立ち上がりを優しくサポートします。  
<sup>※</sup>オプション



流れるようなオペレーションを、思いのままに。



ユニットの情報が一目瞭然。  
優しい光のLEDライトが、IDによる色分けなど  
様々な使用状況をお知らせ。一目でわかる操作  
パネルが、インストルメントの取り出しや設定を  
2段階の明るさで表示します。



口腔内へ近づくためのスマート設計。  
薄く小さく設計されたバックレストにより口腔  
内へ近づきやすく、小柄な術者でも口腔内への  
アプローチがスムーズに。ラクな姿勢で診察する  
ことができます。



影を作らずワイドに照射。  
無影効果が高いLEDの無影灯  
を採用。口腔内の両側を照らす  
ことができるため、ライトの向きを  
変えず、視線の移動だけで口腔  
内を確認できます。



可動範囲が広く、フリーレイアウトが可能な  
フロアマウントタイプ

**FL** Floor Mount  
Stepless Chair Type



必要最低限の可動範囲とスムーズな動きの  
スライドデリバリータイプ

**SS** Sliding Delivery  
Step Chair Type



思い通りの操作が容易な  
オーバーアームタイプ

**OC** Over Arm  
Contoured Chair Type



フレキシブルなポジショニングが可能な  
カートタイプ

**CL** Cart  
Stepless Chair Type



外装カバー (セレクト)



シルバー



ホワイト

外装カバー (オプション)



メタリックブルー

スピットンカラー (セレクト)



ホワイト



ディープブルー



ドクタータイプ	チェアタイプ					
	ステップレス		ステップ		カンター	
	ショートベース	ロングベース	ショートベース	ロングベース	ショートベース	ロングベース
スライドデリバリー	-	-	-	○	-	○
フロアマウント	○	-	○	○	-	○
オーバーアーム	○	-	○	○	-	○
カート	○	-	○	○	-	○

チェアタイプ



ステップレス  
(ショートベース)



ステップ  
(ショートベース)



ステップ  
(ロングベース)



カンター  
(ロングベース)

シートカラー / 標準色 (セレクト)



メタリックブルー

メタリックパープル


サンセットイエロー

マロンブラウン

リーフグリーン

ターコイズ

シートカラー / 特別色 (セレクト)

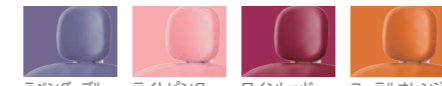

ラベンダーブルー

ライトピンク

ワインレッド

コーラルオレンジ



フロアマウントタイプ メタリックブルー



## 自由自在をかなえるコンパクトさ。

12時 診療時

9時 診療時

患者さんへの説明時

咬合調整や対面診療時



### 多様な診療スタイルに対応できる広い可動域。

可動域に優れたコンパクトなユニットは、左右幅1900mmの空間にも設置可能。フレキシブルなアームが、思い通りの診療ポジションをかなえます。フロアマウントとスライドデリバリーのドクターユニットは、バックレストの裏まで移動し導線を確保。患者さまは、インストゥルメント類を見ることなく着席できるので、診療前の緊張緩和にもつながります。

#### フロアマウントタイプ



#### スライドデリバリータイプ



### ツーハンドでも、フォーハンドでも。

縦方向に約35度傾くアシスタントユニットは、術者が一人でもバキュームを使いやすく設計されています。また、外側に90度回転するので、抜歯などの広いスペースを必要とする時にも有効です。



## 手と足、そして視線に、確かなコントロールを。



### 豊富なバリエーションのインストゥルメント。

エアーピンとマイクロモーター、そして3つのタイプから選べる超音波スケーラー\*。さらに、着色汚れを除去するユニット内蔵型歯面清掃器キット エアフロー\* (エアフローハンドピース/ペリオフローハンドピース)をご用意。5本まで収納できるハンガーは、治療スタイルに応じたレイアウトが可能です。\*オプション

### 光でわかるセッティング。



ドクター3名分の診療スタイルをIDボタンで管理することができ、色分けによるパネルバーで確認できます。また、ディスプレイには、マイクロモーターや超音波スケーラーなどのインストゥルメント使用状況が表示されます。



超音波スケーラー表示

カウントダウンタイマー機能  
※パネルバー表示状況でも確認できます。

### 視界を外さず、確かな足元操作を。

どこを踏んでも快適に反応する薄型の円形ペダル。足元の的確な操作を促すシンプルなフォルムが、思い通りのコントロールを実現。視線を外さず、手元や患部の治療に集中できます。



#### モーターの回転範囲

Tiモーター S / Tiモーター SL	MGモーター	MX2モーター
100~40,000min <sup>-1</sup> (100~8,000min <sup>-1</sup> 20gf-cm~200gf-cm <sup>*1</sup> )	100~40,000min <sup>-1</sup> 25gf-cm~250gf-cm <sup>*1</sup>	100~40,000min <sup>-1</sup> 35gf-cm~350gf-cm <sup>*1</sup>

\*1 トルク設定範囲

# 笑顔に近づく信頼を仕立てました。

あらゆる「快適」を支えるチェアタイプ。



カウンターチェアタイプ

膝折れステップレスのチェアに加えて、カウンターチェアもご用意。乗り降りのしやすさや安定感はもちろん、着席から退席するまで、患者さまの動きをアテンドする機能を搭載しました。様々なシーンを想定し、患者さまと先生方の快適な使い心地を追求。大切な信頼感を支えます。

フィットする工夫を随所に。



標準のマニュアルヘッドレストは、円背の患者さまの身体的負担を軽減する角度にも調整できます。



パワーヘッドレストアークタイプ

パワーヘッドレスト\*は、前方に可動するアークタイプを採用し、頭を乗せたまま、上顎・下顎に適した微妙な角度調整が可能です。フットスイッチを併用すれば、ハンズフリーで調整できます。

※オプション



跳ね上げ式のアームレスト\*は、必要に応じた使い方ができ、乗り降りする患者さまをしっかりとサポート。

※オプション

右:跳ね上げ式  
左:固定

# 別次元の視野で、さらに高い治療の精度へ。

多様化する治療体系に対応する搭載型マイクロスコープ。



カールツァイス OPMI® pico




オプトミック OP-Dent

カールツァイス社製とオプトミック社製の高精度マイクロスコープ\*が搭載可能。アシスタントユニットのライトポールに取り付けることができるので、ユニット周辺のプロアスペースを取りません。

※オプション

## メンテナンスをシンプルに。

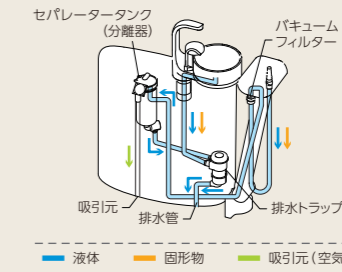

メンテナンスフリーの分離器を搭載。ユニット内蔵型セパレーター(分離器)を標準装備。吸引された固形物をバキュームフィルターで除去し、液体は排水へと分離。さらに、排水トラップでも固形物を除去し、排水管の詰まりも防ぎます。タンク内は自動洗浄でメンテナンスフリーです。



消毒用アルコールなどで清拭消毒しやすいフラットな操作パネル。



汚れをさっと拭き取れるシームレスのシート。



外して洗えるスピットン&コップトレイ。



滅菌対応のハンドルカバー。

### 毎日のフラッシングを簡単手軽に。

スイッチひとつの簡単操作でクリーンナップ。銀イオン配合の過酸化水素水を使った専用の洗浄液\*が、給水管路に滞留して洗浄。独自のユニット給水管路洗浄システム「ツインターボクリーナーII」が、毎日のお手軽なフラッシングを可能にしました。2色の光とブザー音で、作業状態をお知らせ、確認できます。\*別売の「ツインターボクリーナー液」を希釈した洗浄液



ツインターボクリーナー液 750mL  
※1本標準装備




フラッシングアダプタ(イオムシリンジ用/ミニメイト プラスシリンジ用)  
※写真はイオムシリンジ用  
※1セット標準装備



ハンドピースはもちろん、コップ給水部も自動排水、洗浄。作業者の負担を軽減します。




洗浄

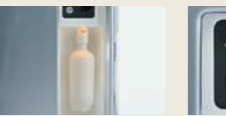

点滅:作業中 点灯:完了



すすぎ

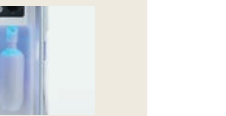

点滅:作業中 点灯:完了

※事前にフラッシングアダプタヘインストゥルメント類のセッティングが必要です。



# OPTION

## Doctor Unit



ユニットバーナーⅡ



デンキー・マウストレー



サイドトレイ



ターピンガード



液晶モニタステー  
(VESA75/VESA100)  
※モニタは別売です。



大型トレイ右側ワイド



大型トレイ左側ワイド  
(オーバーアーム用のみ)



ミニメイト プラスシリンジDr.




コントラストスタンド



MyRay カム C-U2 (口腔内カメラ)

シンプルに使えて キレイに撮れる

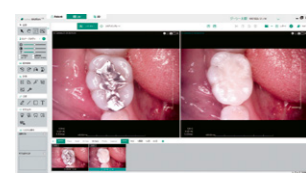

X線画像管理システム  
**Aadvastation**  
と連携可能

※弊社X線の撮影・画像取得等を行う画像管理システム  
※撮影用ソフトウェア iCaptureが付属しています。※TWAIN インターフェースを介してサード  
パーティー製ソフトウェアに転送できます。※詳しい情報は製品パンフレットをご確認ください。

- ドクターパネル保護シート(50枚)
- バーナーケース保護シート2 ワイドタイプ(50枚)
- シリコンシートD
- シリコンシートD 右側ワイド
- シリコンシートD 左側ワイド(オーバーアームのみ)
- トレーシートⅡ(50枚)
- トレーシートⅡ(50枚) 右側ワイド
- トレーシートⅡ(50枚) 左側ワイド(オーバーアームのみ)
- デジタルケーブルキット(USB/USB+HDMI)

## Assistant Unit



オートスピットン



サポートバー



外部給気・給水



ティッシュケース(ライトポール用)  
※手術顕微鏡OPMI<sup>®</sup>pico/手術顕微鏡  
OP-Dentの併設はできません。



ティッシュケース(オーバーアーム用)  
※手術顕微鏡OPMI<sup>®</sup>picoの併設はできま  
せん。



メガネ置き



液晶モニターアーム(VESA75/VESA100)  
※モニタ、ハンドル(左側)は別売です。  
※手術顕微鏡OPMI<sup>®</sup>pico/手術顕微鏡  
OP-Dentの併設はできません。



エジェクター



ミニメイト プラスシリンジAsi.

- PC本体ケース
- 除菌フィルター エアー-水用/エアー用/水用
- 配管ボックス
- アシスタントトレイシリコンシート
- アシスタントパネル保護シート(50枚)


## Chair



パワーヘッドレスト アークタイプ/  
フットスイッチ チェアタイプ  
パワーヘッドレスト切替スイッチ



フットスイッチ(チェアタイプ)

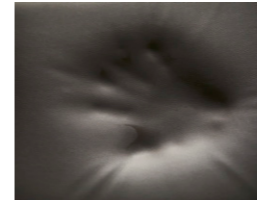

リラクゼーションシート“シフォン”  
(ヘッドレスト・バックレスト・ベンチ  
シート・フットレスト) ※標準色のみ

**chiffon**  
リラクゼーションシート  
【シフォン】



アームレスト  
右のみ\*/左のみ/左右組\*  
右:跳ね上げ式/左:固定  
※オーバーアームタイプは設置不可



ゴムステップ

- 電源ケーブル

## Operating Light



OPMI<sup>®</sup>pico用ボール<sup>※1</sup>  
(Carl Zeiss社製手術顕微鏡  
OPMI<sup>®</sup>pico<sup>※2</sup>のみ設置可能)



OP-Dent用ボール<sup>※3</sup>(オプトミック  
社製手術顕微鏡OP-Dent<sup>※4</sup>のみ  
設置可能)



自動昇降ユニットタイプ  
※手術顕微鏡OPMI<sup>®</sup>pico/手術顕  
微鏡OP-Dentの併設はできま  
せん。

※1:液晶モニターアーム、ティッシュケース(ラ  
イトポール用)、手術顕微鏡OP-Dent、  
オペレーティングライト(自動昇降ユニ  
ットタイプ)の併設はできません。オーバー  
アームタイプには設置できません。

※2:Carl Zeiss社製手術顕微鏡  
OPMI<sup>®</sup>picoは別売です。

※3:液晶モニターアーム、ティッシュケース  
(ライトポール用)、手術顕微鏡  
OPMI<sup>®</sup>pico、オペレーティングライト  
(自動昇降ユニットタイプ)の併設はでき  
ません。

※4:オプトミック社製手術顕微鏡  
OP-Dentは別売です。

## Others



オペレーティングツール  
OS-IV D/A  
(ドクター用)  
外形寸法=458(幅)×509(奥行)×高さ(最高位)862mm  
●シート最高位=613mm  
●シート最低位=460mm

(アシスタント用)  
外形寸法=458(幅)×458(奥行)×高さ(最高位)613mm  
●シート最高位=613mm  
●シート最低位=460mm

オペレーティングツール シートカラー  
標準色


メタリックブルー	ライトピンク
メタリックパープル	ワインレッド
サンセットイエロー	コーラルオレンジ
マロンブラウン	ラベンダーブルー※
リーフグリーン	ターコイズ

※背クッションカラー:ブラックのみ



外装カバー メタリックブルー  
(受注生産品)

# SELECTION

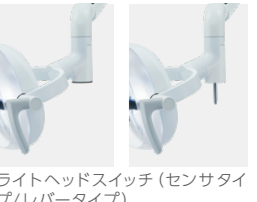

ライトヘッドスイッチ(センサタイ  
プ/レバータイプ)



フットコントローラー  
(円形ペダルタイプ/2ペダルタイプ)



スピットンカラー  
ホワイト/ディーブルー



外装カバー シルバー

- 外装カバー ホワイト

## エアタービン

1. グリーンインパルス Z-ML ライト付  
4点注水スプレー ヘッドサイズφ10.8×H12.1mm
2. グリーンインパルス Z-SL ライト付  
4点注水スプレー ヘッドサイズφ12.5×H13.1mm
3. チタンXカプリングLED
4. チタンXカプリング
5. カポ エキスパートトルク E680L ライト付  
4点注水スプレー
6. カポ エキスパートトルク ミニ E677L ライト付  
3点注水スプレー
7. カポ マルチフレックスLUXカプリング465LRN  
ライト付 スプレー調節リング付
8. カポ マルチフレックスLUXカプリング465LED  
ライト付 スプレー調節リング付

9. Ti-X コントラ C1:1 ライトなし  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
10. Ti-X コントラ C1:1L ライト付  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
11. Ti-X コントラ C1:5 ライトなし  
4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min<sup>-1</sup>
12. Ti-X コントラ C1:5L ライト付  
4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min<sup>-1</sup>
13. Ti-X ストレート S1:1 ライトなし  
シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
14. カポ エキスパートマティック E20C ライトなし  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
15. カポ エキスパートマティック E20L ライト付  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
16. カポ エキスパートマティック E10C ライトなし  
シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>

- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器  
224ALBZX00044A01
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器  
223AIBZX00038000
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器  
219ALBZX00013A01
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器  
219ALBZX00014A01
- ▶管理医療機器 特定保守管理医療機器  
218AIBZX00083000

## マイクロモーター(ブラシレス)

17. MGモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス  
MAX40,000min<sup>-1</sup>  
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器  
220AFBZX000212000
18. MX2 PLUSモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス  
MAX40,000min<sup>-1</sup>  
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX000212000  
※ ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

## マイクロモーター(ブラシ)

19. Tiモーター S ライトなし 内部注水方式  
MAX 40,000min<sup>-1</sup>
20. Tiモーター SL LEDライト付 内部注水方式  
MAX 40,000min<sup>-1</sup>  
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01  
※ ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。  
※ 回転数につきましては、12ページをご確認ください。

## ウルトラソニックスケーラー

21. パリオス2スケーラー ライトなし
22. パリオス2スケーラー LEDライト付
23. EMS2スケーラー ライトなし
24. EMS2スケーラー ライト付
25. ニュートロン スケーラー ライトなし
26. ニュートロン スケーラー ライト付
27. エアフローハンドピース
28. イオムシリンジ
29. ミニメイト プラスシリンジ
30. MyRay カム C-U2

## 歯面清掃器

27. キット エアフロー  
▶ 電動型機器接続歯面清掃用器具 キット エアフロー 管理医療機器  
303AKBZX00016000

## モーターアタッチメント

9. Ti-X コントラ C1:1 ライトなし  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
10. Ti-X コントラ C1:1L ライト付  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
11. Ti-X コントラ C1:5 ライトなし  
4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min<sup>-1</sup>
12. Ti-X コントラ C1:5L ライト付  
4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min<sup>-1</sup>
13. Ti-X ストレート S1:1 ライトなし  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
14. カポ エキスパートマティック E20C ライトなし  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
15. カポ エキスパートマティック E20L ライト付  
シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>
16. カポ エキスパートマティック E10C ライトなし  
シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min<sup>-1</sup>

## シリンジ

28. イオムシリンジ  
※ オプションにマイルドエア/温風風があります。
29. ミニメイト プラスシリンジ  
※ Dr.とAsi対応。

## 口腔内カメラ

30. MyRay カム C-U2  
▶ 歯科用口腔内カメラ 一般医療機器 13B1X00155000309

## エアフローハンドピース

清掃能力の向上とエアロソル飛散を抑制

パウダーの噴射範囲が32%拡大\*、2倍\*の噴射速度になったため、汚れの除去時間を短縮。またこれによりパウダーの消費量とコストを低減しました。

- さまざまな症例で使用可能
- 歯冠から歯肉縁下4mmまで、歯間等の清掃
- 露出根面、インプラントの洗浄

新誘導的ラミナー(層状) AIRFLOW®技術 60%減\*エアロソル飛散

\*自社従来製品との比較

## ペリオフローハンドピース

歯周ポケット内に噴射し効率よく清掃可能

ペリオフローは、ペリオフローノズルを歯周ポケット内に挿入しパウダーと水を噴射できるため、スケーラー等と比較して短時間で清掃できます。

- 歯周ポケット内の洗浄
- ポケット深さ4~9mmまでの症例
- 根分岐部病変のI度(初期)とII度(部分期)に適用

\* Glycemic Index (グリセミック・インデックス)

## ジーシー 歯面清掃パウダー + 水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射可能

パウダー主成分のエリスリトールは、洋ナシや味噌等に含まれる天然糖のため、糖尿病の患者さんにも低GI\*のパウダーで処置できます。また水溶性が高いため、狭いスペースや歯周ポケット内にもパウダーが残りにくくなっています。

ジーシー 歯面清掃パウダー + 水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射可能

内容量: 120g  
主成分: エリスリトール  
平均粒径: 14 μm  
保管条件: 周囲温度 +25℃、相対湿度 90%

歯面研磨材 ジーシー 歯面清掃研磨パウダー 一般医療機器 13B1X00155000249

※弊社エアフローを既にご使用の医院様「ジーシー 歯面清掃パウダー + (エリスリトール)」をご使用される場合、パウダーチャージャー内供給エア圧の変更が必要なため弊社支店・営業所までご連絡ください。


## 装備一覧表

ドクターユニット	標準装備	オプション	工場オプション(ご注文時に申し受けます)
ドクターユニット本体:フロアマウントタイプ、スライドデリバリータイプ、オーバーアームタイプ、カートタイプ*	●	△	▲
ドクターユニット3HP(タービン1回路/モーター1回路)	●	△	▲
イオムシリンジDr.	●	△	▲
タービンホースキット(1本)	●	△	▲
グリーンインパルス Z-ML/Z-SL(いずれか1本)	●	△	▲
チタンXカプリングLED(1個)	●	△	▲
MGモーター本体、ホースキット(1セット)	●	△	▲
Ti-X コントラ C1:1(1本)	●	△	▲
Ti-X ストレート S1:1(1本)	●	△	▲
ジーシータービンスプレー(1本)	●	△	▲
トレーシートII(10枚)/トレーシートII(10枚) 左側ワイド(オーバーアームのみ)	●	△	▲
ドクターパネル保護シート(10枚)	●	△	▲
スーパーロー制御機構	●	△	▲
ハンガリー追加キット(1HP追加する際に加算)	●	△	▲
タービンホースキット	●	△	▲
グリーンインパルス Z-ML	●	△	▲
グリーンインパルス Z-SL	●	△	▲
チタンXカプリング	●	△	▲
チタンXカプリングLED	●	△	▲
カポ エキスパートトルク E680L	●	△	▲
カポ エキスパートトルク ミニ E677L	●	△	▲
カポ マルチフレックスLUXカプリング465LRN	●	△	▲
カポ マルチフレックスLUXカプリング465LED	●	△	▲
カポ マルチフレックスLUXカプリング460LED	●	△	▲
Tiモーター S本体、ホースキット	●	△	▲
Tiモーター SL本体、ホースキット	●	△	▲
MX2 PLUSモーター本体、ホースキット	●	△	▲
Ti-X ストレート S1:1	●	△	▲
Ti-X コントラ C1:1/C1:1L	●	△	▲
Ti-X コントラ C1:5/C1:5L	●	△	▲
カポ エキスパートマティック E20C/E20L	●	△	▲
カポ エキスパートマティック E10C	●	△	▲
カポ エキスパートマティック E25C/E25L	●	△	▲
ウルトラソニックスケーラー/パリオス2 スケーラー	●	△	▲
自動洗浄セパレータータンク	●	△	▲
ウルトラソニックスケーラー/EMS2スケーラー	●	△	▲
回転スピンドル(マニュアル)	●	△	▲
カラー(セレクト):ホワイト、ティールブルー	●	△	▲
ヒータータンク	●	△	▲
排水トラップ、パキユーム切替弁	●	△	▲
オートコック給水(超音波センサ)	●	△	▲
ディスポーザブルカップ(100個)	●	△	▲
エジェクター	●	△	▲
ユニットバーナーII	●	△	▲
液晶モニター(別途モニター要)	●	△	▲
デンキマウスドレナー	●	△	▲
タービンガード	●	△	▲
サイドレール	●	△	▲
コントラスト	●	△	▲
大型トレー右側ワイド	●	△	▲
大型トレー左側ワイド(オーバーアームのみ)	●	△	▲
シリコーンシートD	●	△	▲
シリコーンシートD 右側ワイド	●	△	▲
シリコーンシートD 左側ワイド(オーバーアームのみ)	●	△	▲
トレーシートII(50枚)	●	△	▲
トレーシートII(50枚) 右側ワイド	●	△	▲
トレーシートII(50枚) 左側ワイド(オーバーアームのみ)	●	△	▲
液晶モニターアーム(別途モニター要)	●	△	▲
ドクターパネル保護シート(50枚)	●	△	▲
バーナーケース保護シートII ワイドタイプ(50枚)	●	△	▲
配管ボックス	●	△	▲
メガネ置き	●	△	▲
ディッシュケース:ライトボール用/オーバーアーム用	●	△	▲
PC本体ケース	●	△	▲
アシスタントパネル保護シート(50枚)	●	△	▲
アシスタントトレーシリコーンシート	●	△	▲


●電源電圧=AC100V 50/60Hz ●最大消費電力=900VA ●使用空気圧=0.50MPa ●使用水圧=0.20MPa

## イオム アクア仕様


●電源電圧=AC100V 50/60Hz ●最大消費電力=900VA ●使用空気圧=0.50MPa ●使用水圧=0.20MPa

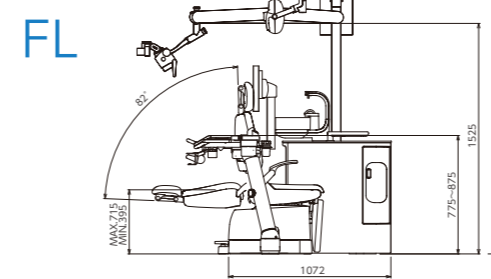


## 平面図

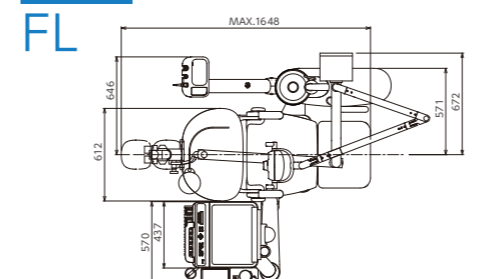


重量=FL:約230kg/約300kg(OPMI® pico搭載時)

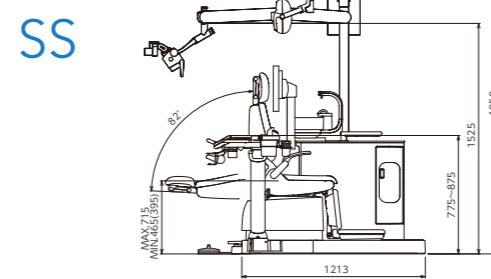


## 平面図

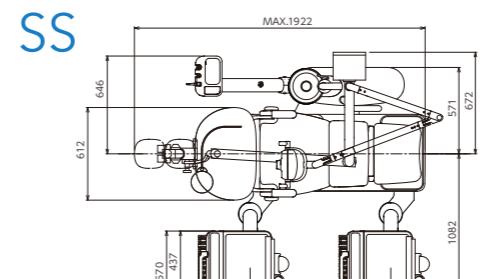


重量=SS:約260kg/約330kg(OPMI® pico搭載時)

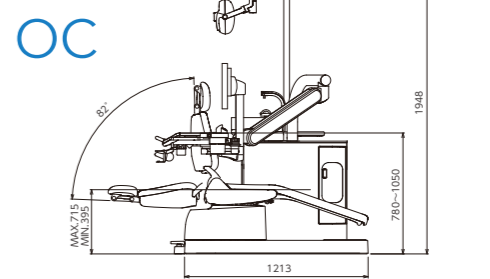


## 平面図

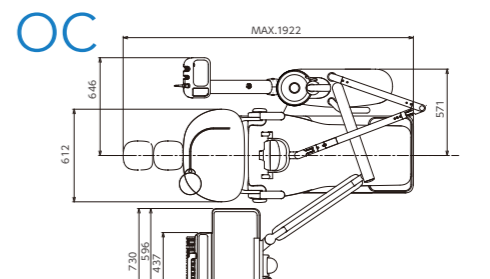

重量=OC:約260kg

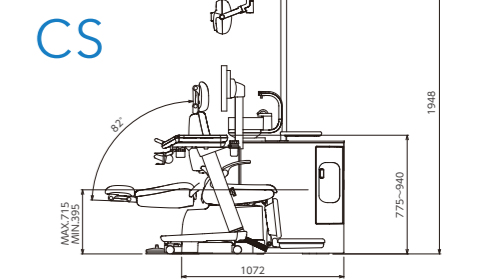

## 平面図

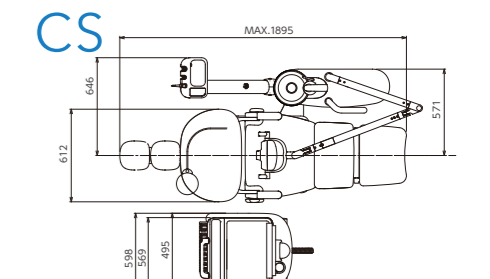

重量=CS:約240kg

チェア	標準装備	オプション	工場オプション(ご注文時に申し受けます)
チェア本体:ステップレスタイプ、ステップタイプ、カンタータイプ	●	△	▲
チェアベース:ショートベースタイプ、ロングベースタイプ	●	△	▲
ヘッドレスト(マニュアル)	●	△	▲
シートカラー(セレクト): (標準色)メタリックブルー、メタリックパープル、 ブルー(セレクト):ホワイト、マロンブラウン、 リーフグリーン、ターコイズ	●	△	▲
(特別色)ラベンダーブルー、ライトピンク、 ワインレッド、コーラルオレンジ	●	△	▲
フットコトロー(セレクト):円形ペダルタイプ、2ペダルタイプ	●	△	▲
フットスイッチ(チェアタイプ)	●	△	▲
パワーステアリング	●	△	▲
フットスイッチ チェアタイプ/パワーステアリング切替スイッチ	●	△	▲
リクライニングシート「リフォード」(標準色のみ)	●	△	▲
アームレスト:右のみ/左のみ/左右両方	●	△	▲
ゴムステップ(ステップチェアタイプのみ)	●	△	▲
オペレーティングライト	●	△	▲
ライト本体:グローバルライトII(LED) ユニタタイプ	●	△	▲
ライトボール	●	△	▲
ライトヘッドスイッチ(セレクト):センサ、レバー	●	△	▲
ライトボール 液晶モニターアーム用	●	△	▲
ライト本体:グローバルライトII(LED) 自動昇降ユニットタイプ	●	△	▲
マイクロスコープ用ライトボール(OPMI pico用/OP-Dent用)	●	△	▲
その他	●	△	▲
外装カバー(セレクト):シルバー、ホワイト	●	△	▲
外装カバー:メタリックブルー	●	△	▲
オペレーティングスツールOS-IV(Dクター用)	●	△	▲
オペレーティングスツールOS-V(アシスタント用)	●	△	▲

## 主な関連器具の滅菌・消毒対応

オートクレーブ滅菌対応	滅菌・消毒対応
グリーンインパルス	●
Ti-X コントラ	●
Ti-X ストレート	●
パリオス2/EMS2/ニュートロンスケーラーハンド	●
ピース・チップ・レンチ	●
シリコンノズルカバー	●
パキユームハンドピース・L型チップ・シリコンチップ	●
エジェクターハンドピース・チップ(金属製)	●
シリコーンシート	●
ライトハンドカバー	●
消毒用アルコールによる清拭消毒対応	●
チェアシート	●
ドクターユニット(ドレー・ハンガリー・アーム)	●
アシスタントユニット(ハンガリー・アーム)	●
操作パネル	●
ライト(アーム・ボール)	●
タービン用カプリング(ライト付)	●
マイクロモーター本体	●
タービンホース	●
モーターホース	●
パキユームホース	●
エジェクターホース	●
スピンドル(洗浄ノズル・コップ用ノズル・コップ受け)	●
ディスポーザブル	●
トレーシート	●
各パネル保護シート	●

\*詳しくは各製品の使用説明書にしたいが、正しく清掃、除菌、殺菌、滅菌、保管を行ってください。

# イオム アクア

歯科用ユニット



EOMのさらなる進化  
イオム アクア 専用サイト

歯科用ユニット イオム アクア 管理医療機器 特定保守管理医療機器 231AKBZX00012000

※掲載の情報は、2022年7月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。  
※写真には一部オプションを含む場合があります。詳しくは装備一覧表をご覧ください。  
※写真には機能説明のため、一部機器を装着していない場合があります。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※ソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。

ジーシー  
公式アプリ



RA050C2207

